

2024年5月1日作成(第6版)

WAXY、WAXY Plus用 ミリングバー 使用説明書

【用途】

本製品は、WAXYまたはWAXY Plusのミリングバーである。ジルコニアディスクを切削加工するために用いる回転器具でWAXYまたはWAXY Plusに取り付けて使用すること。

【仕様、包装】

製品番号	部品番号	製品名	刃径	材料/ コーティング等	包装単位
5500181	5500040	WAXY ミリングバー Φ1.0 (ジルコニア用) 5P	Φ1.0mm	超硬	5本/包装

【寿命の目安】

400分 (ただし、各種条件で変動する)

【使用上のご注意】

- 当ミリングバーはワックス用と同一仕様製品であるが、ジルコニア加工後には**混在して使用しないこと**。
刃先が摩耗しており、破損や補綴物の面荒れ等が発生する場合があるため充分注意すること。ワックス用と**区別するため付属のシールをケースに貼り付けて使用する**こと。
- 用途以外に使用しないこと。
- 被削材料に適したミリングバーを使用すること。被削材に適さないミリングバーを使用すると破損することがあるので、間違いが無いよう適切に管理すること。
- 使用前に変形や破損等がないか確認し、変形、破損、腐食等があるものは使用しないこと。
- 使用時間を大きく超えて使用しないこと。但し、使用時間に満たない場合でも、補綴物の面荒れやマージン部のチッピング等が発生する場合は、新品に交換すること。
- 本製品の加工、改造は行わないこと。
- 本製品の使用中に異常な振動や音を感じた際は、直ちに使用を中止すること。
- 本製品は刃物であるため、取扱いには充分注意すること。
- 本製品は十分な知識及び技能を有する歯科医療有資格者以外は使用しないこと。また、歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。
- 破損の原因になるため、刃部を持つ、衝撃を加える、変形させる行為はしないこと。
- 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。

【交換方法】

本体製品WAXYまたはWAXY Plusの取扱説明書を参照すること。

【本体製品 届出内容】

分 類 : 一般医療機器
一 般 的 名 称 : 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
販 売 名 : ワクシー 届 出 番 号 : 14B3X00019000009
販 売 名 : ワクシー プラス 届 出 番 号 : 14B3X00019000014

【製造販売元】 *

デジタルプロセス株式会社
〒243-0014 神奈川県厚木市旭町1-24-13 第一伊藤ビル 8F
dipro-dental@cs.jp.fujitsu.com