

OCS-11 hana 用 クーラント液 使用説明書

【用途】

本製品は、OCS-11 hanaのクーラント液である。所定の濃度に希釈して補充または入れ替えすること。

【仕様、包装】

製品番号	製品名	包装単位
7500050	OCS-11 クーラント 2ℓ	2ℓ/包装

【使用上のご注意】

- 用途以外に使用しないこと。
- 他種類のクーラント液と混ぜないこと。
- 希釈濃度を10～20倍で使用する。
- 本製品に貼付している注意事項も厳守すること。特に下記に注意すること。
 - ① 目に入ると炎症を起こすことがある。取り扱う際は保護眼鏡を使用するなどして目に入らないようにすること。
 - ② 皮膚に触れると炎症を起こすことがある。取り扱う際は保護手袋をするなどして皮膚に触れないようにすること。
 - ③ 飲まないこと。
- 本製品は十分な知識及び技能を有する歯科医療有資格者以外は使用しないこと。また、歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。
- 次の不具合の原因となるため、クーラント液を規定通りに使用すること。
 - ① ミリングバーの刃先が詰まり、正常な加工が出来なくなる。
 - ② 切削効率が悪くなる。
 - ③ 内部の部品の錆が発生しやすくなる。

【交換方法】

本体製品OCS-11 hanaの取扱説明書を参照すること。

【本体製品 届出内容】

分 類 : 一般医療機器
一 般 的 名 称 : 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
販 売 名 : オーシーエス-11 hana
届 出 番 号 : 14B3X00019000011

【製造販売元】*

デジタルプロセス株式会社
〒243-0014 神奈川県厚木市旭町1-24-13 第一伊藤ビル 8F
dipro-dental@cs.jp.fujitsu.com