

2024年5月1日作成(第2版)

## OCS-11 hana 用 クーラントフィルター 使用説明書

### 【用途】

本製品は、OCS-11 hanaのクーラントフィルターである。フィルターが目詰まりし、クーラントが濾過されずに受け皿にたまるようになった際に交換して使用すること。

### 【仕様、包装】

製品番号	製品名	包装単位
7500060	OCS-11 クーラントフィルター 各30入	300mm×185mm 30枚、 150mm×185mm 30枚 /包装

### 【使用上のご注意】

- 用途以外に使用しないこと。
- 本製品は十分な知識及び技能を有する歯科医療有資格者以外は使用しないこと。また、歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。
- フィルター交換を怠ると循環するクーラント液に切粉が混ざり、次の不具合の原因になるため、適宜、フィルター交換を行うこと。
  - ①コレットチャックの汚れの影響で工具把持力の低下や自動工具交換できないことがある。
  - ②クーラントタンク内に切粉が溜まり、クーラントを吸上げるポンプ故障の原因になる。

### 【交換方法】

本体製品OCS-11 hanaの取扱説明書を参照すること。

### 【本体製品 届出内容】

分 類 : 一般医療機器  
一 般 的 名 称 : 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット  
販 売 名 : オーシーエス-11 hana  
届 出 番 号 : 14B3X00019000011

### 【製造販売元】\*

デジタルプロセス株式会社  
〒243-0014 神奈川県厚木市旭町1-24-13 第一伊藤ビル 8F  
dipro-dental@cs.jp.fujitsu.com